



**Amplificateur
auditif**


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

APSA01 IB-FR 00

Table des matières

Contenu de l'emballage :	3
Présentation de l'amplificateur auditif	4
Démarrage	6
1. Chargement de l'amplificateur auditif.....	6
2. Activation de l'amplificateur auditif	7
3. Réglage du volume	7
4. Pose de l'amplificateur auditif	8
Réglage du volume	9
Redécouvrez le monde par le son!	10
Astuce pour les nouveaux utilisateurs	11
Dépannage	15


Contenu de l'emballage :

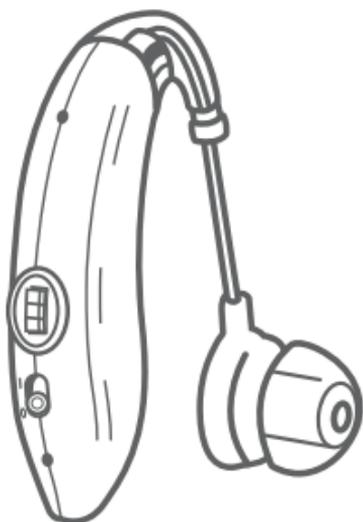

Amplificateur auditif
avec dôme de taille
moyenne



Brosse/Embout
de nettoyage

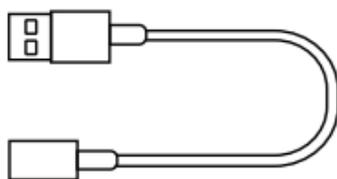


Câble de
chargement



Dômes de taille
petite, moyenne et
grande

Présentation de l'amplificateur auditif

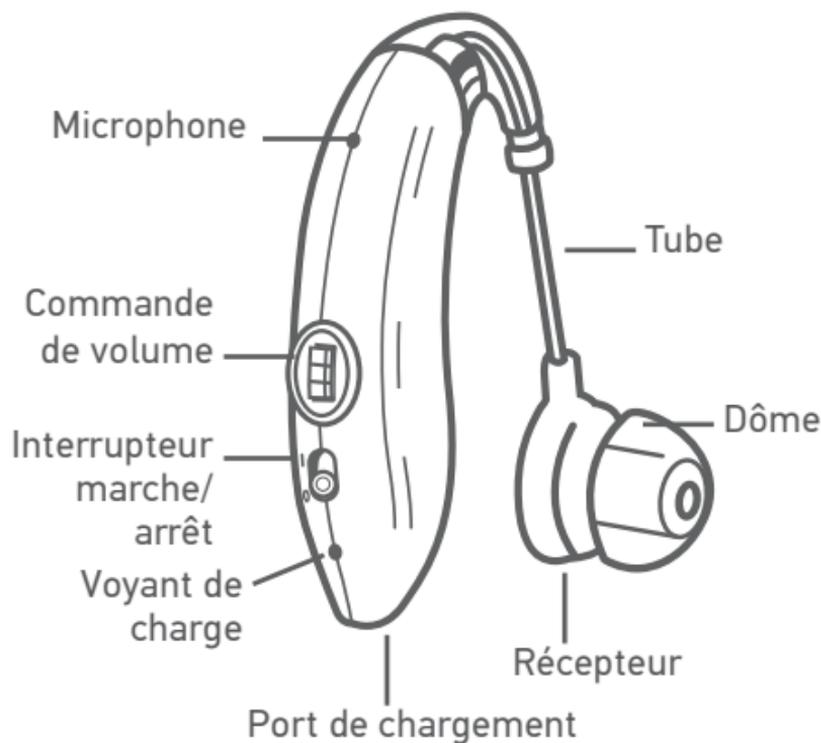

Le microphone capte les bruits autour de vous que l'amplificateur auditif traite et envoie dans l'oreille. Veillez à maintenir le microphone aussi dégagé que possible.

La molette de commande de volume règle le niveau d'amplification appliqué au son. La tourner pour augmenter le volume.

L'interrupteur marche/arrêt allume (position vers le haut) et éteint (position vers le bas) l'amplificateur.

Le voyant de chargement s'allume en orange lorsque l'amplificateur auditif est en cours de chargement. Ce voyant s'éteint lorsque l'amplificateur auditif est complètement chargé.

Le port de chargement permet de brancher le câble de chargement inclus pour charger l'amplificateur auditif par le biais d'une source d'alimentation USB (comme un ordinateur ou un adaptateur).

Le tube transmet de signal du microphone au récepteur et au dôme. Adapté aussi bien pour l'oreille gauche que pour l'oreille droite, il suffit de le tourner.

Le récepteur transmet le son traité dans l'oreille.

Le dôme s'insère confortablement dans l'oreille pour une retransmission directe du son de l'amplificateur auditif dans le canal auditif. Le dôme de taille moyenne est installé en usine sur l'appareil. Essayer les autres tailles disponibles si le dôme ne convient pas à la taille de votre oreille.

Démarrage


1. Chargement de l'amplificateur auditif

Pour une performance optimale, charger complètement l'amplificateur auditif avant sa première utilisation.

Remarque : S'assurer que l'amplificateur auditif est éteint (interrupteur vers le bas) avant de le charger.


Brancher une extrémité du câble de chargement inclus dans le port de chargement situé au bas de l'amplificateur auditif. Connecter l'autre extrémité dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un adaptateur de chargement USB).

Le voyant de chargement s'allume en orange lorsque l'amplificateur auditif est en cours de chargement. Il s'éteint lorsque l'amplificateur auditif est complètement chargé.

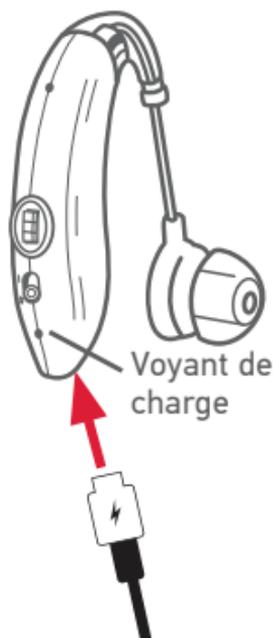


2. Activation de l'amplificateur auditif

Basculer l'interrupteur situé à l'arrière de l'amplificateur auditif vers le haut, sur la position I.

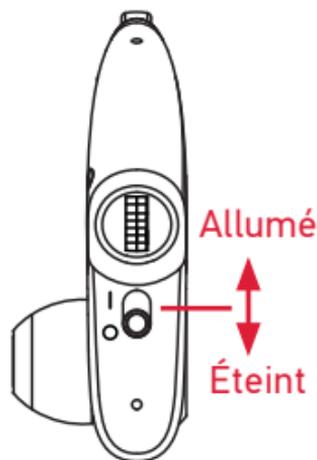

3. Réglage du volume

Régler la molette du volume sur le réglage le plus bas avant la première utilisation de l'amplificateur auditif.

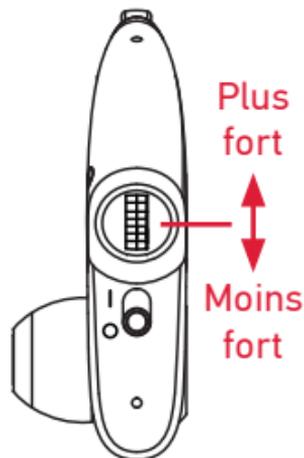

4. Pose de l'amplificateur auditif

Par défaut, l'amplificateur auditif est prêt pour être utilisé sur l'oreille droite.

Utilisation de l'amplificateur auditif sur l'oreille gauche : Tourner le récepteur et le dôme de sorte que le dôme soit orienté dans la direction opposée.




Première utilisation de l'amplificateur auditif

Placer le corps de l'amplificateur auditif derrière l'oreille. Ensuite, insérer doucement le dôme dans l'oreille pour qu'il soit bien en place.




L'amplificateur auditif est livré avec un dôme de taille moyenne installé en usine. Si le dôme semble trop grand ou petit pour un port confortable, le changer et utiliser un des autres dômes inclus.

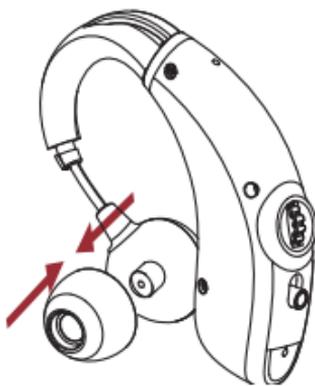


Réglage du volume

S'assurer que l'amplificateur auditif est allumé, c'est-à-dire que l'interrupteur au dos de l'appareil est basculé vers le haut.

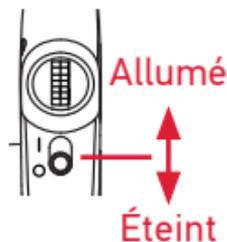

La molette de volume se trouve directement au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt. Augmenter petit à petit le volume jusqu'à ce que les bruits qui vous entourent deviennent plus clairs.

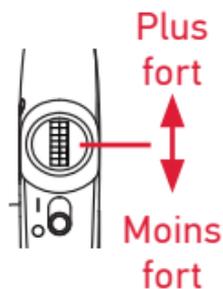

Il sera nécessaire d'expérimenter avec différents niveaux de volume dans différents environnements pour déterminer ce qui convient.

Redécouvrez le monde par le son!

Cela peut prendre un temps avant de s'y habiter!

Votre nouvel Amplificateur auditif AR vous permet d'entendre des sons que vous n'avez peut-être plus l'habitude d'entendre, des sons quotidiens comme le mécanisme d'une horloge, le froissement ou bruissement de papier, des chuchotements ou des conversations à voix basse, des bruits extérieurs provenant d'animaux, de la circulation ou de passants à proximité.

Ces sons peuvent être perturbants au début, peut-être même étourdissants.

Donnez-vous le temps de vous y habituer. Cela pourrait prendre jusqu'à 30 jours (voire plus). Nous recommandons d'utiliser votre nouvel amplificateur auditif une heure ou deux par jour au début, sur des réglages les plus bas si possible. Augmenter graduellement la durée et les diverses situations dans lesquelles utiliser votre nouvel amplificateur auditif, jusqu'à ce que cela devienne naturel.

IMPORTANT : Ne pas utiliser l'amplificateur auditif dans des environnements bruyants. Une suramplification peut engendrer un inconfort et endommager votre ouïe.

Astuce pour les nouveaux utilisateurs

- Votre propre voix peut vous sembler étrange les premiers temps que vous portez un amplificateur auditif. Ceci est normal et devrait passer après quelques semaines d'utilisation.
- Des sons de fréquence plus forte, tels que l'eau qui coule ou le froissement de papier, peuvent sembler plus forts au début. Ces hautes fréquences sont également essentielles pour comprendre clairement la voix. S'habituer à des sons à fréquence plus haute dans votre environnement prend du temps et de la patience, mais vous comprendrez clairement la voix par la suite. La plupart des utilisateurs relatent qu'après 3 à 4 semaines d'utilisation régulière, les amplificateurs auditifs facilitent la conversation, même dans des environnements plus ou moins bruyants.
- Utiliser un téléphone peut prendre beaucoup de pratique. Tenir le téléphone près de l'oreille peut engendrer une rétroaction acoustique, c'est-à-dire un sifflement ou un craquement dans l'amplificateur auditif. Si cela se produit, essayer de pencher le téléphone ou de le placer un peu plus loin de l'oreille.

suite à la page suivante...

Astuce pour les nouveaux utilisateurs (suite)

- Entendre des conversations plus clairement change la donne lors de vos interactions, que ce soit avec une ou plusieurs personnes. Les étapes supplémentaires suivantes peuvent vous permettre d'aller encore plus loin :
 - Tentez de vous placer en face des personnes à qui vous parlez ou que vous écoutez
 - Dans des environnements bruyants, tentez de vous positionner de sorte que l'origine du bruit se trouve derrière vous.
 - Ne criez pas! Parlez clairement et lentement.
 - Dans le cadre de réunions ou d'ateliers sans son amplifié, asseyez-vous aussi près de la source du son que possible.
 - Demandez à votre interlocuteur d'attirer votre attention avant de parler afin que vous puissiez pleinement participer à la conversation.

Nettoyage & entretien

Garder l'amplificateur auditif propre est crucial pour en tirer le meilleur parti. Porter un amplificateur auditif peut engendrer une production de cérumen plus importante. Il est donc particulièrement crucial de réaliser la routine de nettoyage quotidien suivante.

- **Essuyer la surface de l'amplificateur auditif** avec une lingette humide, un chiffon doux, ou un mouchoir.
- **Brosser autour du microphone de l'amplificateur auditif** avec la brosse fournie.
- **Nettoyer tout excédant de cérumen présent dans le dôme et la tige.**



Retirer le dôme du récepteur de l'amplificateur auditif.



Utiliser l'embout de nettoyage pour nettoyer à l'intérieur de la tige. Nettoyer le dôme avec un chiffon doux et humide ou avec du savon doux et de l'eau. Veiller à bien laisser sécher le dôme avant de le remettre en place sur la tige du récepteur.

Un entretien adéquat vous permettra d'utiliser l'amplificateur auditif AR pendant des années. Il est important de respecter les mises en garde suivantes.

- NE PAS mouiller l'amplificateur auditif ni laisser de l'eau pénétrer à l'intérieur.
- NE PAS porter l'amplificateur auditif pour nager, prendre une douche, par temps de forte pluie ou dans un environnement humide (par exemple un sauna).
- NE PAS utiliser de solvants ni de liquides sur l'oreillette, le tube ou le dôme de l'amplificateur auditif.
- NE PAS vous endormir en portant l'amplificateur auditif.
- NE PAS exposer l'amplificateur auditif à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur excessive.
- Enlever l'amplificateur auditif lors de l'application de cosmétiques, de parfum, de lotion après-rasage, de laque pour cheveux, de lotion ou de tout autre produit risquant de pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Enlever l'amplificateur auditif pendant des activités physiques énergiques, par exemple, lors d'un programme d'entraînement.
- Garder l'amplificateur auditif propre et sec.

Dépannage

Problème : L'amplificateur auditif ne s'allume pas.

Solution : Recharger l'amplificateur auditif. Brancher le câble de chargement fourni dans le port de chargement situé au bas de l'amplificateur auditif. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement sur une source de courant USB. Le voyant de chargement de l'amplificateur auditif s'illumine. Il s'éteint lorsque l'amplificateur auditif est complètement chargé.

Problème : L'amplificateur auditif ne produit pas de son.

Solution : S'assurer que l'amplificateur auditif est chargé et allumé (l'interrupteur d'alimentation devrait être basculé vers le haut). Utiliser ensuite la molette de volume de l'amplificateur auditif pour monter le son. Si le problème persiste, nettoyer le dôme et le microphone de l'amplificateur auditif à l'aide de la brosse/de l'embout de nettoyage fournis.

Problème : L'amplificateur auditif siffle pendant l'utilisation.

Solution : S'assurer que le dôme est bien installé dans l'oreille. Il peut être nécessaire de l'ajuster pour une meilleure installation. Il devrait être bien inséré dans l'oreille de sorte que presque aucun son ne s'échappe. S'il ne peut pas être mieux inséré, essayer une taille de dôme différente.

Problème : L'amplificateur auditif tombe de l'oreille.

Solution : S'assurer d'utiliser un dôme d'une taille adéquate pour l'oreille. Le dôme devrait être bien inséré dans l'oreille pour tenir l'amplificateur auditif bien en place.

©2024 Voxx Accessories Corp.

3502 Woodview Trace, Suite 220 | Indianapolis, IN 46268